

Optibén

STERILE	A
---------	---

Solución oftalmológica hidratante
Hialuronato Sódico 0,2%
Frasco 10 ml

Composición:

Hialuronato sódico 0.2%, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico monobásico, cloruro sódico, cloruro de benzalconio, EDTA disódico, agua para inyección.

¿Cómo se presenta?

Optiben 10 ml es una solución oftalmológica que se presenta en frasco de 10 ml.

¿Qué es Optiben 10 ml?

Las propiedades hidratantes y protectoras del hialuronato sódico alivian la irritación, sequedad, abrasión y sensaciones de cuerpos extraños debidos a elementos ambientales tales como el viento, sol, aire seco, agua salada, humo, luz excesiva, aire acondicionado, calefacción, trabajo prolongado ante el ordenador u operación ocular, conjuntivitis, uso de lentes de contacto.

Posología

Apíquese 1 o 2 gotas en cada ojo cuando lo necesite.

Para usar optiben

Deposite 1 ó 2 gotas de **optiben** en el párpado inferior y parpadee varias veces para que todo el ojo quede cubierto por el líquido.

Precauciones y advertencias

No usar si el frasco está dañado.

No usar si eres sensible a cualquiera de los componentes.

No usar después de la fecha de caducidad indicada en el frasco.

No tocar el ojo con la punta del frasco.

Después de la administración, en casos poco frecuentes, puede producirse ligera imagen borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Se recomienda esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera visión clara.

Retire sus lentes de contacto antes de usar Optiben 10 ml y espere 15 minutos antes de volver a ponérselas.

Dejar un periodo de tiempo de al menos 10 a 15 minutos hasta la administración de otra especialidad oftalmológica.

Una vez abierto el frasco tirar todo la solución que no haya sido utilizada después de 30 días.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No tragar.

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Distribuido por:

LABORATORIOS CINFA S.A.
Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta.
31620 Huarte-Pamplona. Navarra. ESPAÑA.

Fabricante:

Farmigea S.p.A. – Vía G.B. Oliva 8. 56121 Pisa, Italia.